

Ac BD FlashBack® cu camera vidata incorporata

“Rezultate exacte doar cu probe de calitate!”




Un ac nou, cu design unic, ce face recoltarea sangelui mai usoara atat pentru pacient, cat si pentru utilizator

NOVAINTERMED, importator si distribuitor al sistemelor de recoltare **BD Vacutainer®**, are deosebita placere de a va prezenta noul ac pentru colectarea sangelui **BD FlashBack®**. Beneficiile acestuia il recomanda ca si un ajutor binevenit pentru centrele de diagnostic preocupate de calitate si de confortul pacientilor sai.


Camera vidata a acului permite :

- confirmarea imediata a pozitiei corecte a acestuia in vena;
- evitarea incercarilor repetate de recoltare sporind astfel confortul pacientului;
- asigurarea calitatii superioare a probei prin umplerea corecta a tuburilor;
- prevenirea riscului contaminarii personalului (mai putine manevre, procedeu mai rapid)
- Utilizarea sa de catre personalul fara experienta.

O noua metoda de recoltare!

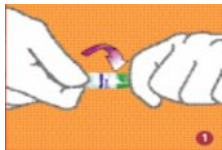

1. Rasuciti si indepartati banda de protectie.

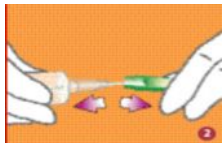

2. Insurubati acul in holder; pregatiti locul punctiei; scoateti capacul acului.



3. Efectuati punctia venoasa; **Asteptati ca sangele sa patrunda in camera transparenta a acului . Astfel se confirma ca acul este in vena!**



4. Introduceti tuburile in holder in ordinea recomandata pentru recoltare.



5. Scoatei acul din vena si impreuna cu holderul aruncati-le intr-un recipient special.

NOVAINTERMED si **BD** sustin financiar acest proiect din dorinta de a aduce inovatia mai aproape de dumneavoastra!

NOVAINTERMED

Str. Drumul Potcoavei 5A, Pipera, Ilfov

T: 031-401.10.90; F: 031-401.10.89; marketing@novaintermed.ro